

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Menox 18	Menox 20	Menox 34
Вязкость	18 сантистоксов	20 сантистоксов	34 сантистоксов
Концентрация EVON	5%	6%	7%
Содержимое и количество	1,5 мл флакон с ДМСО + 1,5 мл флакон Менох (18, 20, 34) + 3 X 1-мл шприц (1 синий совместимый с ДМСО шприц + 2 белых шприца). • 1 синий шприц • 2 белых шприца		

- Время суспендирования тантала

:

20 минут на орбитальном шейкере
- Время затвердевания материала

:

В течение 3 минут
- Скорость введения

:

Рекомендуемая скорость введения — 0,16 мл/мин
Скорость введения не должна превышать 0,3 мл/мин.
- Стерилизация

:

Флаконы Менох LEM и ДМСО — стерилизация сухим жаром
Совместимые с ДМСО шприцы на 1 мл — стерилизация этиленоксидом
- Срок годности

:

4 года
- Хранение

:

Хранить в прохладном, сухом и темном месте в оригинальной упаковке при температуре до 30 °C.

Menox™ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

- MNX18
- MNX20
- MNX34

Menox™ — зарегистрированная торговая марка компании «Мерил Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.» (Meril Life Sciences Pvt. Ltd.).
Изделие Menox™ не одобрено Агентством по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США и не продается в США.



В жизни есть место большому

Производитель:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
Survey No. 135/139, Bilakhia House,
Muktanand Marg, Chala, Vapi - 396 191.
Gujarat, India.
Тел.: +91 260 240 8000

Подразделения:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
301, A-Wing, Business Square,
Chakala, Andheri Kurla Road,
Andheri East, Mumbai 400 093
Тел.: +91 22 39350700
Факс: +91 22 39350777

Meril Inc.
2436 Emrick Boulevard,
Bethlehem, PA 18020
Тел.: +610 500 2080
Факс: +610 317 1672

Meril South America
Meril South America
Doc Med LTDA
Alameda dos Maracatins 992,
Edificio Aquarius, Andar 8,
Bloco B, Moema - CEP -04089001,
Sao Paulo, Brazil
Тел.: +5511 2506-3624

Meril GmbH
Bornheimer Strasse 135-137,
D-53119 Bonn.
Germany
Тел.: +49 228 7100 4000
Факс: +49 228 7100 4001

Meril Tibbi Cihazlar
Meril Tibbi Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.
İçerenköy Mah. Çetinkaya Sok.
Prestij Plaza No:28
Kat:4 Ataşehir, 34752
İstanbul / Turkey
Тел.: +90 216 641 44 24
Факс: +90 216 641 44 25

Meril China Co. Ltd.
2301 b,23f, Lixin Plaza,
no 90,South Hubin Road,
Xiamen, China
Тел.: 0086-592-5368505
Факс: 0086-592-5368519

Meril SA Pty. Ltd.
102,104, S101 and S102,
Boulevard West Office Park,
142 Western Service Road,
Erf 813 Woodmead Extension 17
Sandton, Johannesburg - 2191
South Africa
Тел.: +2711 465-2049
Факс: +27 86 471 7941

ООО «Мерил Медикал»
Пресненская набережная, 12,
Москва, 123112
МФК Федерация 41 этаж, офис 13.
Тел. +7(495)974 29 03

Представитель в ЕС
Obelis S.A.
Bd. General Wahis 53,
1030, Brussels, Belgium
Тел.: +32 2 732 5954
Факс: +32 2 732 6003
Эл. почта: mail@obelis.net

Эл. почта: askinfo@merillife.com
Сайт: www.merillife.com

MNX/BROCHURE/006/MLS/20230130/GLOBAL



В жизни есть место большому

Menox™
Система для жидкой эмболизации



Предназначена для эмболизации артериовенозных мальформаций (АВМ) головного мозга перед хирургической операцией.

Система для жидкостной эмболизации **Menox™** предназначена для эмболизации артериовенозных мальформаций (АВМ) головного мозга перед хирургической операцией и доступна в 3 вариантах:

Система для жидкостной эмболизации Menox™



Вязкость 18 сСт,
5% EVON



Вязкость 20 сСт,
6% EVON



Вязкость 34 сСт,
7% EVON



Диметилсульфоксид (ДМСО) (флакон объемом 1,5 мл)
Используется для промывания.


Совместимый с ДМСО шприц на 1 мл с люэровским наконечником (3 шт.)

- 2 белых шприца с поршнем
- 1 синий шприц с поршнем



Поэтапная эмболизация разорвавшейся левосторонней парietальной АВМ степени II по Spetzler-Martin. Через 6 месяцев последующего наблюдения (n = 16)*

Подробности исследования

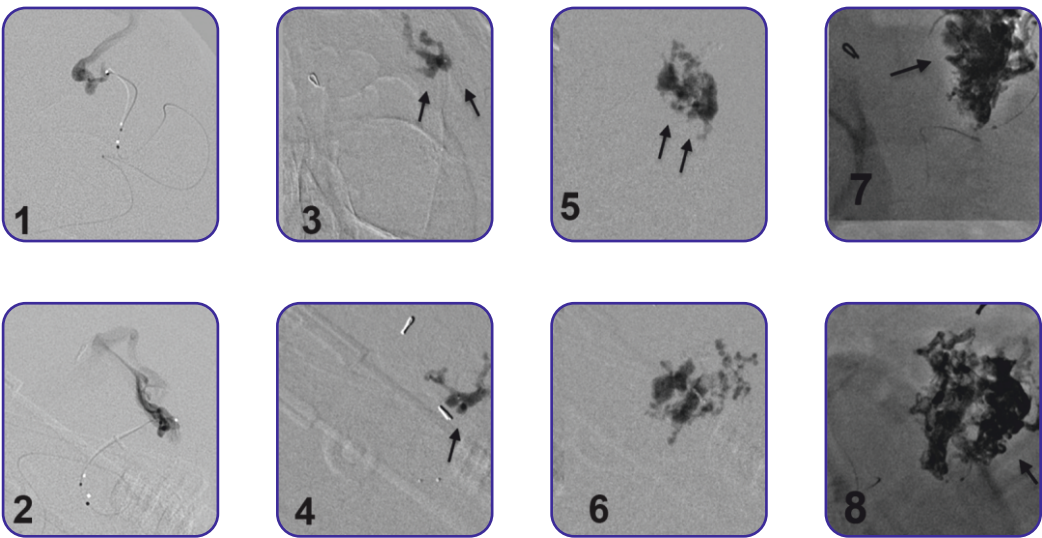

Помещают кончик микрокатетера в очаг мальформации (1 и 2). Средство Менокс 18 успешно достигло дистальной части очага мальформации (3-6, стрелки). Обратите внимание на местонахождение средства Менокс в дистальной части (7, 8; стрелка) и различную рентгеноконтрастность средства для жидкостной эмболизации.

Результаты исследования

Группа исследования (N = 16)	Значение
Средство для жидкостной эмболизации (СЖЭ)	Menox 18
Общая продолжительность рентгеноскопии (сек.)	2460 (900-3761)
Общая продолжительность введения (сек.)	325 (480-980)
Продолжительность одной инъекции (сек.)	21,1 (12-50,1)
Перерыв между инъекциями (сек.)	1,1 (0,4-30)
Кол-во инъекций	11 (8-35)
Общий объем СЖЭ на процедуру (мл)	4,1 (1,2-6)

- Во время и после процедуры не зарегистрировано ни одного осложнения и летального исхода.
- У 10/16 пациентов по результатам хотя бы 1 последующей ангиографии были подтверждены клинический успех и полная облитерация.

*A. Sirakov, S. Sirakov, et al; AJNR A JNeuroradiol April 2020- 14:681-86.